



Siğilleri ve ayak siğillerini yok eder

- **Nokta hassasiyeti ile dondurma**
- **Etkin, kolay ve hızlı**
- **Komşu deri bölgeleri korunur**
- **Doktorlar tarafından uygulanan etkinliği kanıtlanmış yöntem**

Wortie® nedir ve ne için kullanılır?

Wortie® doktorlar tarafından kullanılan kriyoterapi yöntemine benzeyen, yaygın siğillerin ve ayak tabanı siğillerinin (tiken siğilleri) dondurulması için kolaylıkla uygulanabilen bir üründür. Siğiller ve ayak tabanı siğilleri, insan papilloma virüsü (HPV) ile enfeksiyon sonucunda oluşan küçük cilt yumrularıdır.

Yaygın siğiller genellikle parmaklarda, el üzerinde, dizlerde ve dirseklerde görülürler. Bunlar sert, karnabahara benzer yapılarıyla kendilerini belli ederler. Siğil virüsü oldukça bulaşıcıdır ve enfekte alana doğrudan temas yoluyla insana aktarılabilir.

Ayak tabanı siğilleri (tiken siğilleri) yaygın siğillerle büyük benzerlik gösterirler, ancak bunlar sadece ayak tabanında veya ayak parmaklarının altında oluşurlar. Bunlar genellikle ağrılıdır ve merkezinde siyah noktalar olan, küçük, beyaz halkalar şeklinde görünürler. Ayak tabanı siğilleri de bulaşıcıdır ve enfekte alanın, zemin gibi ıslak bir yüzeye teması sonucu bulaşabilirler.

Wortie® nasıl işlev görür?

Eşsiz, patentli hassas aplikatör sayesinde siğiller ve ayak tabanı siğilleri hedefe yönelik olarak dondurulmaktadır. Yuvarlatılmış metal uç siğillerin nokta hassasiyeti ile dondurulmasını garanti etmektedir. Böylece derinin komşu, sağlıklı bölgeleri yanlışlıkla dondurulmadan korunur ve tedavi daha acısız gerçekleştirilir.



Hassas aplikatör

- Siğil / ayak tabanı siğili hedefe yönelik olarak dondurulur
- Siğiller mükemmel bir şekilde yok edilir
- Cilt ile gaz arasında doğrudan temas gerçekleşmez

Siğillerin veya ayak tabanı siğillerinin tedavisinde uygulama gerçekleştirilen alan geçici bir süre beyaz bir renk alabilir. Tedavi edilen alanda donma etkisi kaybolunca deri tekrar pembeleşir. Dondurma işlemi sebebi ile siğilin altında kabarcık oluşumu gerçekleşebilir.

Uygulamayı takip eden 10-14 gün içinde siğil yavaş yavaş kaybolur veya düşer ve bunun yerini yeni, sağlıklı deri alır. Siğili başarılı bir şekilde yok etmek için genellikle bir uygulama yeterlidir. Buna rağmen ikinci bir uygulamanın gerekli olması halinde uygulamayı en erken 14 gün sonra tekrarlayabilirsiniz.

Wortie® ile başka siğillere veya ayak tabanı siğillerine uygulama yapmadan önce, her kullanım sonrasında metal ucun oda sıcaklığında 20 dakika boyunca ısınmasını bekleyin. Wortie®'yi kullanmadan önce siğili birkaç dakika sıcak suda bekleterek yumuşatmak faydalı olabilir. Böylece muhtemelen siğilin üzerinde oluşmuş olan nasıra daha kolay nüfuz edilecektir.

Neden Wortie®?

Wortie® yaygın siğillerin ve ayak tabanı siğillerinin (tiken siğilleri) hızlı ve etkin bir şekilde yok edilmesi için hassas aplikatöre sahip patentli bir teknoloji kullanmaktadır.

Wortie® hızlı bir şekilde kullanıma hazırdır


Wortie® uygulamaya hazır bir şekilde ambalajlanmıştır ve derhal kullanıma hazırdır. Böylece küçük süngerlerle veya küçük parçalarla zahmetli uğraşılardan ortadan kalkar. Wortie®'yi ambalajından çıkardıktan birkaç saniye sonra siğili tedavi edebilirsiniz.

Wortie® etkindir ve güvenli bir uygulamaya sunar

Eşsiz hassas aplikatör sayesinde siğil hızlı bir şekilde tedavi edilebilir. Ayrıca sıvı gaz doğrudan deriye temas etmez. Soğuk, metal bir uç ile deriye iletilir. Böylece tedavi esnasında dondurma performansı, uygulanan basınçla duruma göre ayarlanabilir. Kuvvetli basınç uygulandığında metal ucun büyük bir kısmı deriye temas eder ve böylece cildin daha geniş bir bölümü dondurulur. Aplikatör sadece hafifçe bastırılırsa deriye temas alanı daha küçüktür. Böylece daha küçük siğiller de kolaylıkla ve neredeyse acısız olarak tedavi edilebilir.

Wortie®'nin döner başlığı otomatik olarak başlangıç pozisyonuna döner. Böylece uygulama esnasında yanlışlıkla etkinleştirme önlenmiş olur. Wortie® 4 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

Wortie® nasıl kullanılır?

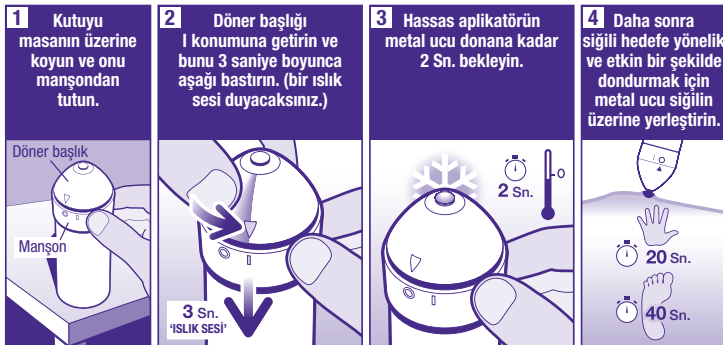

1. Kapağı çıkartın ve kutuyu bir masanın üzerine veya düz bir zemine koyun. Döner başlığın altında bulunan manşonu başparmak ve işaret parmağıyla tutun.
2. Ardından boşta kalan elinizle üstteki döner başlığı saat yönünün aksine doğru çevirerek I pozisyonuna getirin. Döner başlığı 3 saniye boyunca aşağı bastırın. Bu esnada metal uca temas etmemeye dikkat edin. Bu sırada ısıklık sesine benzer bir ses duyacaksınız.
3. **Döner başlığı bırakın. Ürün kullanılmadan önce döner başlığın otomatik olarak 0 pozisyonuna geri geldiğinden emin olun. Hassas aplikatörün metal ucu donana kadar 2 saniye bekleyin.**
4. Donmuş olan metal ucu tam siğilin üzerine yerleştirin ve uygulama yapılan deri bölgesine göre 20 saniye (el) ila 40 saniye (ayak) siğile temas ettirin. Metal ucu siğile yerleştirdiğinizde dondurma işlemi sebebi ile hafif bir acı hissedilebilir. Bu his normaldir ve uygulamadan birkaç saat sonra kaybolacaktır.

Emniyet tedbirleri

Wortie® şu durumlarda kullanılmamalıdır:

- Döner başlık I pozisyonunda sıkışmışsa;
- 4 yaşından küçük çocuklarda;
- Yüzde veya derinin yüze yakın alanlarında, koltuk altında, göğüste, kalçalarda veya genital bölgede;
- Benlerin, doğum lekelerinin, kıllı siğillerin veya vücudtaki diğer benlerin üzerinde;
- Hassas, iltihaplanmış, zedelenmiş, kesilmiş, sıyrılmış, hasta veya kaşıntılı derinin olduğu bölgelerde;
- Söz konusu yumrunun siğil olduğuna emin olmamanız halinde. Lütfen bu durumda önce doktorunuza danışın.
- Gebesiz veya emziriyorsanız. Bu durumda önce doktorunuza danışın.
- Diyabet hastası iseniz.

Uyarı açıklaması

Kutu basınç altındadır. Güneş ışınından ve 50° C üzerindeki sıcaklıklardan koruyun. Kullandıktan sonra da zorla açmayın veya yakmayın. Alev veya kor halindeki nesne üzerine püskürtmeyin. Çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Kutu sıkıca kapalı tutulmalı ve serin bir yerde muhafaza edilmelidir. Yakıcı kaynaklardan uzak tutun – Sigara içmeyin. Buhar/aerosol solunmamalıdır. Yalnızca iyi havalandırılan ortamlarda kullanılmalıdır. Yüksek derecede yanıcı özelliğe sahiptir.

Eğer bir çocuk tedavi edilecekse, güvenlikle ilgili sebeplerden dolayı tedavi bir yetişkin tarafından gerçekleştirilmelidir. Metal ucu siğile temas ettirirken aşırı basınç uygulamayın. Uygulama maksimum 20 Sn. (el) ila 40 Sn. (ayak) süreyle gerçekleştirilebilir. Wortie® birkaç kişi tarafından kullanılıyorsa, metal uç her uygulama sonrasında bir bez ve evsel kullanım için uygun bir temizlik maddesi ile silinmelidir. Farklı siğillerin birbirlerine yakın bir konumda bulunuyor olması halinde her bir siğile ayrı uygulama gerçekleştirilmelidir.

Yan etkiler

- Tüm siğil dondurma uygulamalarında olabileceği gibi, uygulama yapılan bölge geçici olarak beyaz bir renk alabilir.
- Lokal deri yaralanmalarını önlemek için uygulama süresine (elde bulunan yaygın siğiller için 20 saniye, ayak tabanı siğilleri için 40 saniye) kesinlikle uyun.
- Daha büyük veya uygulamaya dirençli siğillerde uygulama sonrası oluşan kabarcıklar acıya sebep olabilir.
- Siğil deriden ayrıldıktan sonra derinin pigmentasyonu değişebilir veya küçük bir iz kalabilir.
- Dondurma uygulaması, siğilin tedavi edildiği donma sıcaklığı sebebi ile küçük yanık yaralarına yol açabilir. Beklenenden daha şiddetli şikayetleriniz olması halinde lütfen ev doktorunuza danışın

Wortie®'nin içeriği:

Dimetil Eter

CE 0481

Son güncelleme: Eylül 2014

Wortie®'ye ilişkin daha kapsamlı bilgilere ve uygulamaya ilişkin video eğitimine şu adresten ulaşabilirsiniz: www.wortie-hennig.de

Wortie® eczanelere özel bir tıbbi üründür.

Üretici:
YouMedical

YouMedical B.V.
Rijnsburgstraat 9-11
1059 AT Amsterdam
Hollanda

Distribütör:
HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG
Liebigstraße 1-2
65439 Flörsheim/Main
Telefon: 06145 - 50 80
Telefaks: 06145 - 508 140
E-posta: info@hennig-am.de