



Die intensive Warzenvereisung


wortie
Intense

Bei hartnäckigen Warzen
und Dornwarzen



HENNIG ARZNEIMITTEL
Seit 1898 im Dienste der Gesundheit

Inhaltsverzeichnis

Warzen können jeden treffen	3
Was sind Warzen?	4
Wie entstehen Warzen?	5
Warzen im Alltag	6
Wortie® Intense	7
Punktgenaue und intensive Warzenvereisung für Erwachsene	8
Die Vorteile von Wortie® Intense	8
Anwendung	9
Weitere Produkte aus der Wortie®-Familie	10
Qualität aus Erfahrung – HENNIG ARZNEIMITTEL	11





Warzen können jeden treffen!

Egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene: Warzen können jeden treffen!

Die Hautwucherungen, lateinisch auch Verrucae genannt, sind meistens gutartig. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass Warzen anste-

ckend sind und auch sehr schmerzhaft sein können. Manche empfinden sie zudem als ästhetisch störend. Die Kryotherapie, auch als Vereisungsmethode bekannt, ist ein bewährter und einfacher Weg, um Warzen und Dornwarzen zu entfernen.

Bei Jugendlichen und Erwachsenen können Warzen oder Dornwarzen manchmal besonders hartnäckig oder verhornt sein. Hier kann es schwerer sein, die Kälte in das Warzengewebe zu leiten.

Wortie® Intense löst dieses Problem: Mithilfe eines leitfähigen Gels kann die Kälte auch das harte Gewebe durchdringen. Die Warze wird wirksam bis zur Wurzel vereist.

Welche Arten von Warzen gibt es, wie genau funktioniert die Kryotherapie und wie wendet man **Wortie® Intense** richtig an? Auf all diese Fragen gibt die Broschüre Antwort und hält viele nützliche Tipps rund um das Thema Warzen bereit.

Was sind Warzen?

Warzen sind in der Regel gutartige Hautwucherungen, die meist durch eine Infektion mit humanen Papillomaviren (HPV) ausgelöst werden. Man unterscheidet verschiedene Arten:

Gewöhnliche Warzen treten oft an den Fingern, am Handrücken, an den Knien und den Ellenbogen auf. Man erkennt sie an ihrer rauen, blumenkohllartigen Struktur.

Dornwarzen treten ausschließlich an der Fußsohle oder unter den Zehen auf. Sie sind im Allgemeinen schmerzhaft, da sie tief nach innen wachsen, und erscheinen in Form von kleinen weißen Ringen mit schwarzen Punkten in der Mitte.

Mosaikwarzen zählen ebenfalls zu den Fußwarzen. Im Gegensatz zu den Dornwarzen breiten sie sich jedoch nur oberflächlich aus.

Bei den so genannten **Pinselwarzen** handelt es sich um fadenförmige Wucherungen, die meistens im Gesicht auftreten.

Plane Warzen oder **Flachwarzen** sind flach, rund, meist weich und treten häufig bei Kindern und Jugendlichen im Gesicht, an den Handgelenken sowie am Hand- und Fingerrücken auf.

Bei Knötchen im Genital- und Analbereich kann es sich um sogenannte **Feigwarzen** handeln. Sie werden z. B. durch ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen.

Mit zunehmendem Alter können außerdem sogenannte **Alterswarzen** auftreten. Sie werden nicht durch HPV verursacht und sind nicht ansteckend.

Dellwarzen werden nicht durch HPV, sondern von Pockenviren verursacht und zählen trotz ihres Namens eigentlich nicht zu den Warzen. Sie werden durch Schmier- oder Kontaktinfektion übertragen. Sie sind stecknadel- bis erbsengroß, glatt, glänzend und weisen in der Mitte häufig eine Delle auf.



Gewöhnliche Warze



Dornwarze

Wie entstehen Warzen?

Gewöhnliche Warzen und Fußwarzen können durch direkten Kontakt mit humanen Papillomaviren (HPV) übertragen werden. Dabei dringen die Viren bei kleinen Hautverletzungen in die oberste Hautschicht ein.

Insbesondere Kinder und Menschen mit geschwächtem Immunsystem infizieren sich leichter mit einer Warze, da ihre Immunabwehr für Erregerstämme des HPV durchlässiger ist. Fußwarzen können durch Kontakt des infizierten Bereichs mit einer nassen Oberfläche, z. B. dem Fußboden, übertragen werden. Eine HPV Infektion kann auch durch die gemeinsame Nutzung von Handtüchern, Rasierern oder anderen persönlichen Gegenständen erfolgen. Es kann viele Monate dauern, bis sich eine Warze entwickelt.

Warzen im Alltag

Wie unangenehm Warzen sein können, weiß jeder, der unter Dornwarzen an den Fußsohlen leidet. Diese ragen meist tief ins Gewebe hinein und können dort auf Nervenfasern drücken. Jeder Schritt tut dann unheimlich weh und macht Laufen zur Qual. Das stört nicht nur beim Spaziergehen oder Einkaufen, sondern auch beim Sport. Gewöhnliche Warzen an den Händen verursachen zwar normalerweise keine Schmerzen, können aber viele Alltagsaktivitäten, bei denen Fingerfertigkeiten benötigt werden, einschränken. Das kann zum Beispiel beim Kochen, bei Handarbeiten oder beim Gitarre spielen der Fall sein.



Wortie® Intense hilft Ihnen, Ihre Warzen einfach und schnell loszuwerden. Schaumpflaster sorgen dafür, besonders empfindliche Warzenstellen, wie unter den Füßen, nach der Behandlung abzudecken und zu schützen.

Wortie® Intense von HENNIG ARZNEIMITTEL

Wortie® Intense ist ein einfach anzuwendendes Produkt zur Entfernung von hartnäckigen Warzen und Dornwarzen. Es basiert auf der Kryotherapie (Vereisungsmethode), die auch von Ärzten eingesetzt wird.



Wortie® Intense ist für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren geeignet.







Punktgenaue und intensive Warzenvereisung für Erwachsene

Kryotherapie oder Vereisungsmethode ist eine bewährte Behandlung, um Warzen zu entfernen. Dabei wird die Warze mit einem Vereisungsmittel, z. B. flüssigem Stickstoff oder Dimethylether, eingefroren und löst sich dann nach einigen Tagen ab.

Wortie® Intense verfügt über einen patentierten Präzisionsapplikator, mit dem die Warze punktgenau vereist werden kann. Umliegende, gesunde Hautareale sind dadurch vor versehentlicher Vereisung geschützt. Die Haut gerät dabei nicht in direkten Kontakt mit dem in **Wortie® Intense** enthaltenen Vereisungsmittel.

Wortie® Intense enthält zusätzlich eine Tube mit leitfähigem Gel, das die Vereisungsleistung im Warzengewebe maximiert. So kann die Kälte auch das harte Gewebe durchdringen. Die Warze wird wirksam bis zur Wurzel vereist.

Die Vorteile von Wortie® Intense auf einen Blick

-  Mit leitfähigem Gel für eine maximierte Vereisungsleistung
-  Flache Metallspitze für große verhornte Warzen und Dornwarzen
-  Der patentierte Präzisionsapplikator sorgt für eine gezielte Vereisung der Warze/Fußwarze
-  Schaumpflaster schützen bei schmerzenden Dornwarzen

Anwendung

Wortie® Intense ist schnell einsatzbereit. Bereits wenige Sekunden nachdem Sie **Wortie® Intense** aus der Verpackung entnommen haben, können Sie die Warze einfach und effektiv behandeln:



Geben Sie vor der Behandlung einen Tropfen Gel auf die Warze.



Drehen Sie den Deckel so, dass der Pfeil auf den Eiskristall zeigt. Drücken Sie den Deckel für 3 Sekunden nach unten.



Setzen Sie die Metallspitze exakt auf die Warze. Vereisen Sie Warzen an der Hand für 20 Sekunden und Warzen am Fuß für 40 Sekunden.



Bei besonders empfindlichen Dornwarzen kann nach der Behandlung unterstützend ein Schaumpflaster zum Schutz auf die Warze geklebt werden.

Weitere Produkte aus der Wortie® Familie



Die schmerzarme Warzenvereisung für Kinder und Erwachsene



Wortie® ist ein einfach anzuwendendes Produkt zur Vereisung von gewöhnlichen Hand- und Fußwarzen (Dornwarzen), vergleichbar mit der Kryotherapie, die von Ärzten eingesetzt wird. **Wortie®** ist bereits für Kinder ab 4 Jahren geeignet.



Die punktgenaue Vereisung von Stielwarzen



Mit **Wortie® spezial** lassen sich Stielwarzen ganz einfach und schnell zu Hause durch die bewährte Kryotherapie (Vereisungsmethode) entfernen. Selbstklebende Fixierungsringe stabilisieren die Stielwarze und verhindern ein Wegrutschen.

Qualität aus Erfahrung

Wortie®, **Wortie®** **spezial** und **Wortie®** **Intense** sind Qualitätsprodukte von **HENNIG ARZNEIMITTEL**.

Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung und eigener Produktion in Deutschland haben wir uns als inhabergeführtes Familienunternehmen auf die Herstellung und Vermarktung hochwertiger pharmazeutischer Produkte spezialisiert.

Neben zahlreichen verschreibungspflichtigen Medikamenten bieten wir auch ein kontinuierlich wachsendes Sortiment rezeptfreier Arzneimittel, Medizinprodukte und Nahrungsergänzungsmittel an, die Sie exklusiv in der Apotheke erhalten.

Weitere Informationen zu
HENNIG ARZNEIMITTEL

finden Sie unter


www.hennig-am.de





von **HENNIG ARZNEIMITTEL**

Wortie® Intense erhalten Sie exklusiv
in Ihrer Apotheke:

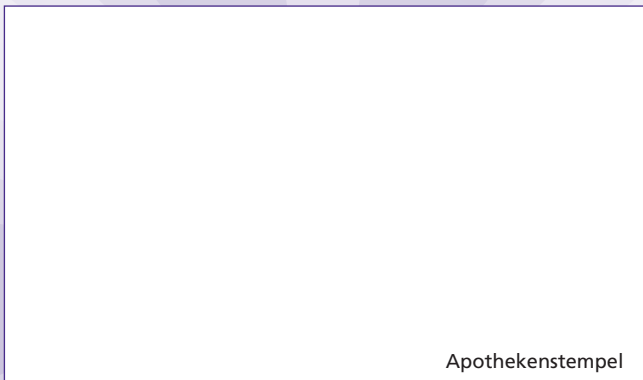

Apothekenstempel

Weitere Informationen und
eine Video-Anleitung zu
Wortie® intense erhalten Sie unter
www.wortie-hennig.de



HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG

Liebigstraße 1-2 · 65439 Flörsheim am Main · www.hennig-am.de

Art.-Nr.: 20899 / 1901